



Produktinweise für Ihre Curavi Pflegebox

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch sind unverzichtbare Helfer im Pflegealltag. Um sich und Ihre Liebsten zu schützen, ist die richtige Anwendung der Hilfsmittel entscheidend. In den folgenden Abschnitten erklären wir Ihnen, wofür die verschiedenen Produkte geeignet sind und wie Sie diese fachgerecht anwenden.

Schutzschürzen (Einmalgebrauch)



i Produktinformationen

- Wasserdichte Einwegschürzen aus robuster, dünner Folie, die zuverlässig vor Nässe und Verschmutzung schützen
- Schützt die Kleidung der Pflegeperson und sorgt für Sicherheit und Sauberkeit
- Besonders nützlich bei der täglichen Körperhygiene, sei es beim Waschen oder bei der Intimpflege

id Gebrauchsanweisung

1. Schürze vorsichtig über den Kopf ziehen
2. Die Bänder hinter dem Rücken sorgfältig zusammenbinden, damit die Schürze sicher sitzt
3. Nach Gebrauch bitte im Restmüll entsorgen

Schutzservietten (Einmalgebrauch)



i Produktinformationen

- Schützt die Kleidung des Pflegebedürftigen zuverlässig vor Flecken und Verschmutzungen
- Einsatz während der Mahlzeit, zum Schutz beim Essen und Trinken
- Ideal auch zum sicheren Wechseln von Inkontinenzmaterial und Verbänden

id Gebrauchsanweisung

1. Die Schutzserviette vollständig entfalten und vorsichtig vor dem Oberkörper anlegen
2. Stecken Sie die obere Kante der Schutzserviette in den Kragen des Hemdes oder der Bluse, sodass sie sicher hält
3. Nach der Verwendung bitte ordnungsgemäß im Restmüll entsorgen

Händedesinfektionsmittel



Produktinformationen

- Unverzichtbar für die Hygiene in der häuslichen Pflege, insbesondere beim Wechsel von Inkontinenzmaterial, Verbänden
- Flüssiges Hände- und Hautdesinfektionsmittel, das bei regelmäßiger Anwendung hautfreundlich ist
- Schützt wirksam vor Infektionskrankheiten durch eine umfassende Wirkung gegen Bakterien, Pilze, behüllte Viren (z. B. Coronaviren) und bestimmte unbehüllte Viren (z. B. Noro-, Rota- und Adenoviren)
- Speziell entwickelt, um die Haut auch bei häufigem Gebrauch geschmeidig und gesund zu halten

Gebrauchsanweisung

1. Achten Sie darauf, das Desinfektionsmittel nur auf trockene und intakte Haut aufzutragen
2. Sorgfältig verteilen, so dass alle Bereiche der Hände, einschließlich Fingerspitzen und Daumen, gut benetzt sind
3. Etwa 30 Sekunden einwirken lassen, um eine gründliche Desinfektion zu gewährleisten

Einmalhandschuhe



Produktinformationen

- Puderfreie Einmalhandschuhe aus Nitril, auf Anfrage auch aus Latex erhältlich
- Schützen vor der Übertragung von Infektionskrankheiten
- Bieten Sicherheit sowohl für den Träger als auch für die zu pflegende Person
- Besonders geeignet zum Wechseln von Inkontinenzmaterial, Verbänden, zur Körperpflege und zur Verabreichung von Medikamenten

Gebrauchsanweisung

1. Vor und nach dem Gebrauch der Handschuhe die Hände gründlich desinfizieren
2. Handschuhe nur mit sauberen und trockenen Händen anziehen
3. Handschuhe wechseln, wenn sie feucht geworden sind oder nach jeder Pflegetätigkeit, z.B. Körperpflege oder Inkontinenzversorgung
4. Bitte tragen Sie die Handschuhe nur so lange wie notwendig
5. Nach einmaligem Gebrauch bitte fachgerecht entsorgen

Flächendesinfektionstücher




Produktinformationen

- Hochwirksame, gebrauchsfertige Tücher aus robustem Vliesmaterial
- Besonders geeignet für die regelmäßige Reinigung stark frequentierter Flächen wie Türklinken, Toilettensitze, Bettgestelle und Tische
- Schützt zuverlässig vor der Übertragung von Krankheitserregern durch wirksame Abtötung von Bakterien, Pilzen und behüllten Viren (z.B. Coronaviren)
- Bei der Anwendung sind keine Handschuhe erforderlich, da die Tücher schnell und unkompliziert wirken
- Ideal für den Einsatz in Bereichen mit besonders hoher Keimbelastung

Gebrauchsanweisung

1. Die Tücher sind gebrauchsfertig und dürfen nicht mit Wasser vermischt werden
2. Vor dem Einsatz der Tücher sind sichtbare Verschmutzungen und brennbare Rückstände zu entfernen
3. Trockene Flächen oder Gegenstände gründlich mit dem Tuch abreiben, um eine vollständige Desinfektion zu gewährleisten
4. Einwirkzeit gemäß Packungsangaben einhalten, um maximale Wirksamkeit zu erzielen
5. Sorgen Sie nach der Anwendung für eine gute Belüftung des Raumes

Fingerlinge

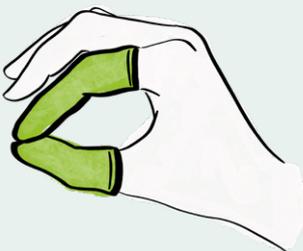


Produktinformationen

- Unsterile Einweg-Fingerschutzprodukte, die speziell für den Schutz einzelner Finger entwickelt wurden
- Hergestellt aus flexiblem Material, das eine einfache Handhabung und bequeme Anwendung ermöglicht
- Ideal zum Schutz der Finger bei der Wundversorgung und der Verabreichung von Medikamenten
- Besonders nützlich bei der Inkontinenzversorgung und beim Verbandwechsel

Gebrauchsanweisung

1. Ziehen Sie die Fingerlinge vorsichtig über den zu schützenden Finger.
2. Verwenden Sie die Fingerlinge während der Wundversorgung oder beim Kontakt mit Medikamenten.
3. Nach der Nutzung die Fingerlinge bitte sicher im Hausmüll entsorgen.

Bettschutzeinlagen (Einmalgebrauch)

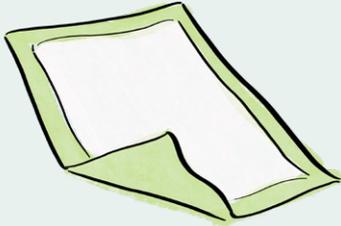


i Produktinformationen

- Nässeschutz durch spezielle Einweg-Bettschutzeinlagen, die Flüssigkeiten effektiv aufnehmen und speichern
- Bietet dem Pflegebedürftigen hohen Liegekomfort und Trockenheit
- Außenseite aus wasserundurchlässigem Material schützt Matratze und Sitzmöbel vor Nässe und Verschmutzung
- Ideal für den Einsatz bei Inkontinenz, beim Verbandwechsel oder bei der Körperpflege direkt im Bett

i Gebrauchsanweisung

1. Breiten Sie die Einlage vollständig aus und legen Sie sie mit der Folienseite nach unten auf die gewünschte Fläche
2. Darauf achten, dass die Einlage faltenfrei aufliegt
3. Nach Gebrauch die Einlage von den Rändern zur Mitte hin zusammenfalten und im Restmüll entsorgen

Bettschutzeinlagen (wiederverwendbar)

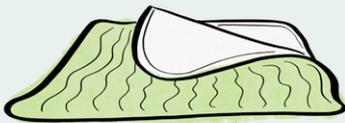

✓ waschbar bis 95°C

✓ weniger Müll

i Produktinformationen

- Nässeschutz durch spezielle Einweg-Bettschutzeinlagen, die Flüssigkeiten effektiv aufnehmen und speichern
- Bietet dem Pflegebedürftigen hohen Liegekomfort und Trockenheit
- Außenseite aus wasserundurchlässigem Material schützt Matratze und Sitzmöbel vor Nässe und Verschmutzung
- Ideal für den Einsatz bei Inkontinenz, beim Verbandwechsel oder bei der Körperpflege direkt im Bett

i Gebrauchsanweisung

1. Breiten Sie die Einlage vollständig aus und legen Sie sie mit der Folienseite nach unten auf die gewünschte Fläche
2. Darauf achten, dass die Einlage faltenfrei aufliegt
3. Nach Gebrauch die Einlage von den Rändern zur Mitte hin zusammenfalten und im Restmüll entsorgen

FFP2-Masken



i Produktinformationen

- Mehrlagige partikelfiltrierende Halbmasken aus dicht gewebtem Vliesstoff
- Wirksamer Schutz gegen Infektionen, die durch Tröpfchen und Aerosole übertragen werden
- Schützen sowohl den Träger als auch andere Personen, besonders nützlich bei Erkältungskrankheiten
- Ideal für die kalte Jahreszeit, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln oder geschlossenen Räumen

ib Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Anlegen der Maske die Hände gründlich desinfizieren
2. Sicherstellen, dass die Maske Mund und Nase vollständig bedeckt
3. Die elastischen Bänder sicher hinter den Ohren befestigen
4. Drücken Sie den Metallbügel fest auf den Nasenrücken, um einen guten Sitz zu gewährleisten
5. Vermeiden Sie es, die Maske während des Tragens zu berühren
6. Entsorgen Sie die Maske nach Gebrauch ordnungsgemäß im Restmüll

Medizinische Gesichtsmasken



i Produktinformationen

- Medizinische Gesichtsmasken bestehen aus mehreren dünnen Vlieslagen und bieten Schutz vor Infektionen, die durch Tröpfcheninfektion übertragen werden
- Besonders geeignet für den Fremdschutz und für kurze Tragezeiten
- Geeignet bei der Wundversorgung zur Minimierung der Keimübertragung
- Idealer Begleiter in der kalten Jahreszeit

ib Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Anlegen der Maske die Hände gründlich desinfizieren
2. Gesichtsmaske nur an den Außenseiten anfassen
3. Die Maske muss Mund und Nase vollständig bedecken
4. Die elastischen Bänder sicher hinter den Ohren befestigen
5. Während des Tragens die Maske nicht berühren, um die Schutzwirkung zu erhalten
6. Nach Gebrauch im Hausmüll entsorgen

Flächendesinfektionsmittel



Produktinformationen

- Desinfektionslösung für Flächen und Gegenstände, ideal für den Hausgebrauch
- Reduziert das Risiko von Infektionskrankheiten durch effektive Reinigung
- Bekämpft eine Vielzahl von Keimen, darunter Bakterien, Pilze, sowie Noro- und Coronaviren
- Sofort einsatzbereit, keine Handschuhe erforderlich
- Optimal für die regelmäßige Desinfektion von Flächen
- Besonders geeignet für Badezimmer, Küchen und Bereiche, in denen Lebensmittel verarbeitet werden

Gebrauchsanweisung

1. Tragen Sie das Desinfektionsmittel unverdünnt auf ein Tuch auf
2. Vor der Anwendung sichtbare Verschmutzungen und mögliche Zündquellen entfernen
3. Trockene Flächen oder Gegenstände mit dem Tuch gründlich abwischen
4. Desinfektionsmittel nach Packungsangabe einwirken lassen
5. Für ausreichende Belüftung des Raumes sorgen

Haben Sie Fragen zur Anwendung unserer Produkte?

Gerne stehen wir Ihnen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung:

 +49 (0) 621 879 44444 (Mo-Fr: 8-17 Uhr)

 info@curavi.de